



INSTRUÇÃO DE USO

EVACUADOR TUR-VAC ALLWIN

Evacuador de Bexiga



Indicação:

O Evacuador TUR-VAC Allwin deve ser usado para evacuar soluções de irrigação, coágulos sanguíneos e para coleta de tecidos e/ou funções de treinamento durante a cirurgia de próstata ou de bexiga.

Referência	Descrição
TV	TUR-VAC Evacuador de Ellick com Adaptador

Contraindicações:

Nenhuma conhecida.



Advertências / Precauções:

- Verifique a compatibilidade do adaptador com endoscópios e assegure-se de que os encaixes estão bem apertados.
- Descarte de acordo com a prática médica reconhecida e em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.
- O produto deve ser utilizado por cirurgiões experientes.
- A reutilização pode comprometer a integridade estrutural, criar um risco de contaminação, promover um resultado indesejado ou criar complicações e/ou infecções que podem resultar em ferimentos, doença ou morte.
- O produto deve ser armazenado a temperaturas de 0°C a 40°C.

Instrução de uso:

1. Encha o reservatório com solução de irrigação.
2. Conecte o adaptador à bainha do ressectoscópio e pressione firmemente para dentro.
3. Encha o evacuador da bexiga com o volume apropriado de solução de irrigação.
4. Alternativamente, aperte o reservatório várias vezes, para remover o tecido da bexiga. Repita se necessário.

A tentativa de reesterilizar um dispositivo de uso único pode comprometer sua integridade estrutural e / ou levar à falha do dispositivo.

Garantia Expressa Limitada:

A garantia expressa limitada, conforme estabelecido neste documento, é exclusiva e substitui todas as garantias de comercialização e adequação para uso, soluções, obrigações e responsabilidades por consequentes danos.

Os produtos estão sendo vendidos apenas para os fins descritos neste documento e tal garantia expressa limitada é válida apenas para o usuário original. Em nenhum caso a ALLWIN será responsável por qualquer violação da garantia em qualquer valor que exceda o preço de compra do produto. A ALLWIN reserva-se o direito de efetuar alterações de design aos produtos sem responsabilidade de incorporar as referidas alterações nos produtos ALLWIN previamente concebidos ou vendidos



Leia a instrução



Somente para uso único



Usar até



Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada



FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO



Fabricado por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES

Plot # 223, Surat Special Economic Zone,

Sachin, Surat – 394 230, Gujrat

Índia

Distribuidor por:

ALLWIN MEDICAL DEVICES

3305 E. Miraloma AVE.,

Suite 180. ANAHEIM, USA

Importado e distribuído por:

EIC Brasil Exportadora de Produtos Industrializados Ltda.

Rua Teixeira da Silva, 54 cjs. 91, 92, 93 e 94 - Paraíso

04002-030 – São Paulo – SP

CNPJ: 09.209.604/0001-17

Tel: 11 4371-1555

Responsável técnico: Eva Oselka

CRF/SP: 27.331

Registro ANVISA nº 80518270029